

DracoHydro

ultra

Hydrokolloide Wundauflage

DracoHydro ultra ist eine hydrokolloide Wundauflage basierend auf Hydrogeltechnologie. Das gut absorbierende, transparente Gelwundkissen mit Carboxymethylcellulose gewährleistet eine zuverlässige Exsudataufnahme. Die sanft haftende Polyurethanfolie mit hautfreundlichem Acrylatkleber stellt eine sichere Barriere gegen Bakterien von außen dar. In Verbindung mit Wundsekret vergelt **Draco Hydro ultra** zu einem feuchten Gel, das günstige Voraussetzungen für den Heilungsprozess schafft.

Anwendungsgebiete:

DracoHydro ultra ist geeignet für nicht infizierte Wunden bis zu mittlerer Exsudation, einschließlich trockener Wunden, z. B. chronische Wunden wie Ulcus cruris (venös, arteriell) sowie akute Wunden.

Anwendungshinweise:

Vor der Anwendung von **DracoHydro ultra** die Wunde reinigen und die Wundumgebungshaut sorgfältig trocknen. **DracoHydro ultra** aus der sterilen Einzelverpackung entnehmen. Zur Applikation zuerst die mit „1“ gekennzeichnete weiße Schutzfolie entfernen. Das Gelkissen von **DracoHydro ultra** zentral auf der Wunde platzieren und darauf achten, dass das Gelkissen ausreichend über die Wundränder hinausgeht. Den verbleibenden Teil der weißen Schutzfolie entfernen und die Kleberänder sanft an die Haut drücken. Anschließend die äußere mit „2“ gekennzeichnete, transparente Trägerfolie entfernen. Je nach Exsudationsmenge kann **DracoHydro ultra** 3-7 Tage auf der Wunde verbleiben. Zum Ablösen der Wundauflage einfach die Kleberänder ein wenig anheben und sanft entfernen.

DracoHydro ultra darf nur einmal verwendet werden.

DracoHydro ultra ist nur steril, solange die Einzelverpackung unversehrt ist.

DracoHydro ultra nicht bei beschädigter Verpackung anwenden.



Eine Wunde steht immer im Zusammenhang mit dem Gesamtorganismus. Die Beseitigung aller Faktoren, die eine Wundheilung hemmen können, ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Wundbehandlung.

Gegenanzeigen:

DracoHydro ultra darf nicht bei Patienten mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegenüber den Inhaltsstoffen wie z. B. Acrylat angewendet werden.

DracoHydro ultra darf nicht angewendet werden:

- bei tiefen Wunden, bei denen Muskeln, Sehnen oder Knochen freiliegen
- bei stark blutenden Wunden
- bei Verbrennungen 3. Grades
- als Abdeckung schmaler, tiefer, schlecht zugänglicher Wunden mit Hohlräumen

Verfügbare Größe:

10 cm x 10 cm PZN: 05496336

Produkte, die von Dr. Ausbüttel & Co. GmbH zum einmaligen Gebrauch bestimmt sind, dürfen nicht (wieder)aufbereitet werden. Eine (Wieder)aufbereitung zerstört die funktionale Integrität der Produkte.

CE 0482        5°C 25°C

Rev.: 181017RW-13951-GA