



# FUTURO™ RÜCKEN-BANDAGE ANPASSBAR

46820DABI



MITTLERER  
STÜTZGRAD

**Doppeltes Kordelzugsystem zur schnellen und einfachen Anpassung.**

## IDEAL FÜR:

Bücken, Heben, alltägliche Aktivitäten

## EIGENSCHAFTEN:

- 1 Abnehmbare Lendenwirbelpolster bieten Polsterung und zusätzliche Unterstützung.
- Seiteneinsätze aus Stretch minimieren Verrutschen und Faltenbildung.
- Passend für einen Taillenumfang bis 130 cm.

## GRÖSSE:

Artikelnummer	PZN	CM
46820DABI	9198883	73.7-129.5



ATMUNGSAKTIVES  
MATERIAL

Verwendungszweck: Hilft bei der Unterstützung eines steifen, verstauchten oder schmerzenden Rückens.


**ACHTUNG: Manche Personen reagieren möglicherweise empfindlich auf Neopren oder Neoprengummi. Falls sich Hautausschlag bildet, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf.**

Zusammensetzung: Nylon, Polyester, Neopren, Elasthan, EVA, Polyurethanschäum, TPE+POM+Nylon, Polypropylen, Metall.

Falls Unbehagen oder Schmerzen auftreten, anhalten oder stärker werden, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf.

3M und FUTURO sind Handelsmarken von 3M.


## TRAGEANWEISUNG:

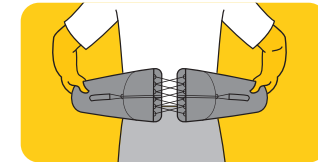

Entfernen Sie bei Bedarf die Pelotten an der Innenseite der Bandage. Positionieren Sie die Schnürung in der Mitte der Wirbelsäule.



Legen Sie die Seitenteile um die Taille und schließen Sie die Bandage so, dass sie komfortabel, aber eng anliegt.

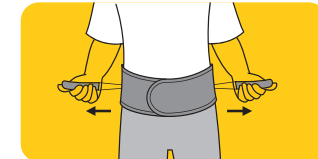

Fassen Sie die Zugkordellaschen auf beiden Seiten und ziehen Sie sie nach außen, bis die Bandage den gewünschten Stützeffekt bietet.



Bringen Sie die Kordellaschen nach vorn und befestigen Sie sie. Passen Sie den Sitz der Bandage gegebenenfalls noch an.

3M Deutschland GmbH, Consumer Health Care  
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss  
www.futuro.de

