



VapoSpray

Baby & Kind

mit Meerwasser

Isotonisches Spray
zur Nasenspülung

Lesen Sie vor der Anwendung bitte die Gebrauchsanweisung.

 2012-10

Gebrauchsanweisung:

- Drücken Sie vor der ersten Anwendung kurz auf den Sprühkopf, um den Applikator zu aktivieren
- Während das Kind auf der Seite liegt oder mit zur Seite geneigtem Kopf sitzt, führen Sie das Ende des Sprühkopfs vorsichtig in ein Nasenloch ein
- Drücken Sie kurz (1 - 2 Sekunden) auf den Sprühkopf
- Lassen Sie die überschüssige Lösung herausfließen und säubern Sie dann die Nase des Kindes
- Wiederholen Sie den Vorgang im anderen Nasenloch
- Reinigen Sie den Sprühkopf nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser

Anwendung: 2 bis 6 mal täglich in jedem Nasenloch.

Die Flasche kann in jeder Position verwendet werden. Zur Vermeidung der Übertragung von Infektionen sollte die Flasche nur von einer Person verwendet werden.

Anwendbar: ab 9 Monate.

Bei einem bestimmungsgemäßen Gebrauch von WICK VapoSpray Baby & Kind sind keine Gegenanzeigen bekannt.

Wenn gleichzeitig Arzneimittel in der Nase angewendet werden müssen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zusammensetzung:

WICK VapoSpray Baby & Kind mit Meerwasser ist ein Nasenspray das aus einer isotonischen Meerwasser-Lösung besteht.

Gefiltertes Meerwasser 31,82 Gew.-%

Gereinigtes Wasser 68,18 Gew.-%