

Gebrauchsinformation

Beruhigt und lindert gereizte Augen.

Zur besseren Befeuchtung der Augen, insbesondere beim Tragen von harten und weichen Kontaktlinsen.

Herba-Vision®

Augentrost

(Euphrasia)

MD sine

Mit Hyaluronat

10 ml Augentropfen

Konservierungsmittelfreie, sterile Lösung zum Befeuchten und Benetzen der Augen mit Augentrosttinktur, hergestellt gemäß HAB 2000, und mit der körpereigenen benetzenden Substanz Natrium-Hyaluronat.

Herba-Vision® Augentrost MD sine Augentropfen bringen Linderung und beruhigen bei gereizten oder trockenen Augen, verursacht durch das Tragen von Kontaktlinsen, Müdigkeit, den Aufenthalt in verrauchten Räumen, langandauernde Computerarbeit oder Belastung durch allgemeine Umwelteinflüsse, wie Staubpartikel, Pollen usw.

Herba-Vision® Augentrost MD sine kann auch während des Tragens von Kontaktlinsen angewendet werden.

Nicht geeignet zum Aufbewahren von Kontaktlinsen!

Zusammensetzung:

1 ml isotonische Pufferlösung enthält

0,5 mg Natrium-Hyaluronat

0,5 mg Augentrosttinktur (HAB 2000)

2,5 mg HPMC (Methocel®)

Anwendung: Hände vor Gebrauch waschen und trocknen. Prüfen Sie vor dem ersten Öffnen, ob das Fläschchen unversehrt ist, um Sterilität des Inhalts zu gewährleisten. Bei Bedarf 2 Tropfen in den Bindehautsack eines jeden Auges einträufeln und durch Blinzeln verteilen. Achten Sie darauf, das Auge nicht mit dem Fläschchen zu berühren.

Bitte diese Gebrauchsinformation beachten.

Hinweise: Bei Raumtemperatur lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht nach Überschreiten des Verfallsdatums anwenden. Nach Anbruch sechs Monate verwendbar.

Vorsichtsmaßnahmen: Lösung nicht einnehmen. Im Falle einer Beschädigung des Fläschchens nicht verwenden. Um Kontamination zu vermeiden, Tropferspitze nicht berühren. Achten Sie darauf, das Auge nicht mit dem Tropfer zu berühren, um Verletzungen oder Augeninfektionen zu vermeiden. Nach Gebrauch verschließen. Nicht verwenden, wenn eine Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe besteht. Bei anhaltenden oder sich verschlechternden Beschwerden einen Facharzt/Spezialisten aufsuchen.

Stand der Information: März 2015

Medizinprodukt

CE 0344

 **OmniVision®**

 **Hersteller:**
OmniVision GmbH

Lindberghstraße 9

82178 Puchheim

Deutschland

Telefon +49 (0)89-84 07 92-30

Telefax +49 (0)89-84 07 92-40

www.omnivision.de

info@omnivision.de

Vertrieb Österreich:

OmniVision GmbH

Anton Anderer Platz 6

1210 Wien

Österreich