

Life is a Picknick!

Kein Stress bei Zeckenbissen



Ade ZECKEN
ENTFERNER



Zecken? einfach abziehen!

Zecken müssen schonend und **ohne Gewaltanwendung** entfernt werden. Mit der Zeckenkarte schiebt man die Zecke mitsamt dem Kopf und den Beißwerkzeugen heraus.

- Stressfreie Zeckenentfernung
- 2 Schlitz für jede Zeckengröße
- Klein, leicht, immer dabei
- Mit praktischer Lupe
- Unbegrenzt wiederverwendbar

Anwendung →

Zeckenkarte richtig anwenden

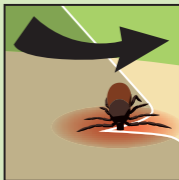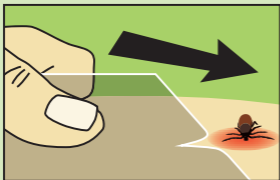

1. Bewahren Sie Ruhe! Zeckenentferner mit der geeigneten Gabelung **flach auf der Haut ansetzen**.
2. Schieben Sie den Schlitz der Zeckenkarte unter das Tier.
3. Streifen Sie die Zecke mit einer **ruhigen, gleitenden Bewegung** ab. Vermeiden Sie dabei, dass die Zecke gequetscht wird.
4. Zuletzt Kontrolle und gründliche **Desinfektion** der Wunde!


Vermeiden Sie Abbrennen, Einölen oder Ausdrehen, denn dadurch kann sich das Risiko erhöhen, sich mit Krankheitserregern zu infizieren. In Zweifelsfällen, z.B. beim Auftreten von Krankheitssymptomen, oder in FSME-gefährdeten Regionen, empfehlen wir Ihnen, zusätzlich **ärztlichen Rat** hinzuzuziehen.

Übrigens: Auch zum **Entfernen eines Bienenstachels** verwendbar.

themed

Ihre Gesundheit ist unser Thema

www.zeckenkarte.de

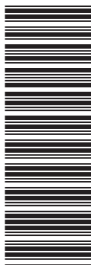

PZN - 11112699