

DracoWundgel

Infekt

Wundgel

DracoWundgel Infekt unterstützt schonend die Reinigung sowie gleichzeitig die Befeuchtung und die Heilung von trockenen, hartnäckig belegten, akuten und chronischen Wunden. Der niedrige pH-Wert fördert die Überwindung der chronisch-stagnativen Heilungsphase bei gleichzeitiger Optimierung des Wundmilieus. **DracoWundgel Infekt** ist für den langfristigen und wiederholten Gebrauch konzipiert und mit anderen Produkten der modernen Wundversorgung kompatibel.

Anwendungsgebiete:

DracoWundgel Infekt ist geeignet zur Reinigung und Befeuchtung akuter und chronischer Wunden sowie zur konservierenden Befeuchtung von hartnäckig belegten, trockenen und gering exsudierenden Wunden. Ebenfalls dient es der Befeuchtung von Verbänden und Wundauflagen.

Anwendungshinweise:

Die zu wechselnde Wundaufgabe entfernen und die Wunde mit einer geeigneten Wundspüllösung sanft reinigen, dabei Beläge entfernen.

DracoWundgel Infekt ist nach Öffnen der Tube applikationsbereit und kann entweder

- a) direkt aus der Tube appliziert werden.
- b) mittels eines sterilen Spatels appliziert werden.
- c) mittels beiliegendem sterilem Applikator appliziert werden, z. B. zum Befüllen von tieferen Wunden.

Der Applikator muss nach einmaliger Anwendung verworfen und die Tube mit Originalverschluss verschlossen werden. Weitere sterile Applikatoren (REF 13941-1) können bei DRACO angefordert werden.

DracoWundgel Infekt ca. 3-5 mm dick auf die Wunde aufbringen oder in Wundtaschen füllen. Falls Wundfüller (Alginat, Hydrofasern) verwendet werden, können diese mit **DracoWundgel Infekt** benetzt werden. Anschließend erfolgt eine Abdeckung mit einer geeigneten Wundaufgabe, z. B. DracoFoam Infekt Schaumstoffwundaufgabe.

DracoWundgel Infekt kann bis zum nächsten Verbandwechsel auf der Wunde verbleiben. Die Anwendung sollte so häufig wiederholt werden, bis sich alle Beläge leicht entfernen lassen und die Wunde optisch sauber erscheint. Die ungeöffnete Tube ist drei Jahre nach Herstellung haltbar. Das Wundgel kann nach Anbruch 4 Wochen verwendet werden. Die Tube muss nach jeder Anwendung verschlossen werden.



DracoWundgel Infekt ist nur zur äußerlichen Anwendung bei akuten und chronischen Wunden gedacht.

DracoWundgel Infekt nicht verwenden, wenn Verpackung der Tube oder des Applikators beschädigt ist.

DracoWundgel Infekt vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit schützen.

DracoWundgel Infekt vor Kindern sicher aufbewahren.

Eine Wunde steht immer im Zusammenhang mit dem Gesamtorganismus. Die Beseitigung aller Faktoren, die eine Wundheilung hemmen können, ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Wundbehandlung.

Gegenanzeigen:

DracoWundgel Infekt soll nicht bei Patienten mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegenüber Hydroxypropyl-Distärkephosphat, Cocoamidopropylbetaine sowie Polyhexanid und nicht in Kombination mit anionischen Tensiden angewendet werden.

DracoWundgel Infekt soll aufgrund fehlender Studien und Langzeiterfahrungen in Schwangerschaft und Stillzeit nur bei zwingender Indikation und nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Bei Säuglingen, Kleinkindern und Kindern soll **DracoWundgel Infekt** nur bei zwingender Indikation angewendet werden.

Verfügbare Größe:

Tube Wundgel à 30 g PZN: 11670146

Produkte, die von Dr. Ausbüttel & Co. GmbH zum einmaligen Gebrauch bestimmt sind, dürfen nicht (wieder)aufbereitet werden. Eine (Wieder)aufbereitung zerstört die funktionale Integrität der Produkte.

CE 0482

REF 13953 DracoWundgel Infekt à 30 g, PZN 11670146 besteht aus:

Tube Wundgel à 30 g (REF 13953-T)

Applikator (REF 13941-1)



Rev.: 190114RW-13953-GA