

MAR[®]

Nasenspray Dusche

Hypertonisches Spray mit Pflanzenextrakten
Befreit & pflegt die Nase

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen.

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

ZUSAMMENSETZUNG

Hypertonische Lösung aus Meerwasser, gereinigtem Wasser, wässrigem Aloe vera-Extrakt und wässrigem Kamillenextrakt. Ohne Konservierungsmittel.

EIGENSCHAFTEN

MAR[®] Nasenspray-Dusche mit Meerwasser, Kamille und Aloe vera ist ein Medizinprodukt zur täglichen Nasenhygiene.

- Befeuchtung der Nasenschleimhaut
- Befreit verstopfte Nasen
- Erleichtert den Abtransport von Schleim

WANN WIRD MAR[®] Nasenspray-Dusche ANGEWENDET?

MAR[®] Nasenspray-Dusche kommt zur Anwendung bei Erwachsenen mit Schnupfen bzw. Rhinitis:

So oft wie nötig in die Nase sprühen, um diese von Schleim und Verunreinigung zu befreien, wobei eine Obergrenze von 3 Anwendungen pro Tag und max. 2 Sprühstößen pro Nasenloch nicht überschritten werden sollte.

Da es sich um ein Produkt mit Meerwasser und Extrakten von Kamille und Aloe vera handelt, wird von einem Gebrauch während der Schwangerschaft und Stillzeit abgeraten.

HINWEISE ZUR ANWENDUNG

1. Den Kopf zur Seite neigen und den Aufsatz vorsichtig in ein Nasenloch einführen.
2. Kurz und kräftig auf den Sprühknopf drücken.
3. Einige Sekunden einwirken lassen.
4. Den Vorgang für das zweite Nasenloch wiederholen.
5. Fangen Sie die herauslaufende Lösung auf.
6. Putzen Sie Ihre Nase.
7. Die Anwendung wiederholen, bis die Nase vollständig gereinigt ist, wobei nicht mehr als 2 Sprühstöße pro Nasenloch abgegeben werden sollten.
8. Den Sprühkopf nach jeder Benutzung mit heißem Wasser abspülen, um Infektionen zu vermeiden.

NEBENWIRKUNGEN

Wie alle Medizinprodukte kann dieses Mittel bei empfindlichen Personen eine allergische Reaktion auslösen. Falls es zu einer solchen Reaktion kommt, putzen Sie sich unverzüglich die Nase und verwenden Sie das Mittel nicht mehr.

Wenn die Nasenschleimhaut gereizt ist, kann es zu Nasenbluten oder zu einer Schmerzempfindung beim Einsprühen kommen.

Wenn die Symptome bestehen bleiben, wenden Sie sich an Ihren Hausarzt.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nach Ablauf des auf der Verpackung angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Nicht verwenden bei bekannter Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe des Produkts.

Ausschließlich gemäß Verwendungszweck anwenden.

Behälter steht unter Druck.

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Nicht über 25 °C lagern.

Den Behälter nicht aufbohren oder verbrennen, selbst nach vollständiger Entleerung.

Hersteller:

Laboratoires Chemineau
93 route de Monnaie
37210 Vouvray
Frankreich

Vertrieb Deutschland:

STADA GmbH
Stadastraße 2-18
D-61118 Bad Vilbel

Stand der Information: April 2016



0459

Medizinprodukt