

## **Gebrauchsinformation: Information für den Anwender**

# **Afinovir<sup>®</sup>**

## **Wundschutzgel**

Afinovir<sup>®</sup> Wundschutzgel dient der Abdeckung zum äußerlichen Schutz vor z.B. Herpesviren, sowie der schnelleren Abheilung von Wunden, leichten Verbrennungen und Sonnenbrand. Afinovir<sup>®</sup> Wundschutzgel besitzt hautpflegende und hautschützende Eigenschaften.

**Bitte lesen Sie diese  
Gebrauchsinformation vor dem Gebrauch  
von Afinovir<sup>®</sup> Wundschutzgel aufmerksam  
durch.**

### **Medizinprodukt**

Afinovir<sup>®</sup> Wundschutzgel ist ein Medizinprodukt. Wirksamkeit und Sicherheit wurden nach der Europäischen Richtlinie für Medizinprodukte (93/42/EWG) geprüft.

Afinovir<sup>®</sup> Wundschutzgel mit Hyaluronsäure ist ein leicht auf die Haut aufzutragendes Gel. Zur topischen Anwendung wird Afinovir<sup>®</sup> Wundschutzgel nach Bedarf entnommen, auf die betroffenen Hautstellen aufgetragen und sanft und gleichmäßig zu einem dünnen Film verteilt. Die bestimmungsgemäße Wirkung des Medizinproduktes wird durch das Hydrogel hervorgerufen. Durch die Filmbildung auf der Haut wird ein oberflächlicher Abdeckeffekt auf der Haut erreicht. Dieser bildet eine mechanische Barriere.

Bei Sonnenbrand und leichten Verbrennungen wird die äußerliche Feuchthaltung und damit verbundene Kühlung als angenehm empfunden.

### **Dosieranleitung, Art und Dauer der Anwendung**

Wann, wie oft und wie lange sollten Sie Afinovir<sup>®</sup> Wundschutzgel anwenden?

Je nach Bedarf mehrmals täglich eine entsprechende Menge aus der Tube

entnehmen, auf die betreffende Körperstelle auftragen und sanft und gleichmäßig zu einem dünnen Film verteilen.

Das Produkt ist für die vorübergehende Anwendung.

### **Zusammensetzung**

Wirkstoff: Hydrogel, Hyaluronsäure  
Sonstige Bestandteile: Propylenglycol, Pentylenglycol, tetrapodales Zinkoxid Microbivac<sup>®</sup>, Panthenol, Allantoin, Benzalkoniumchlorid, Phytinsäure

### **Bitte beachten**

- Das Medizinprodukt nicht anwenden bei stark blutenden oder nässenden Wunden. Wunde vor dem Auftragen reinigen und wenn möglich desinfizieren.
- Wenn sich die Wunde entzündet, ist der Arzt aufzusuchen.
- Nicht auf Schleimhäute, in Augen, Nase, Mund verwenden. Daher bei Anwendung im Gesicht vorsichtig auftragen.
- Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
- Personen mit einer Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe sollten das Produkt nicht verwenden.
- Es liegen keine Erkenntnisse vor, welche gegen eine Anwendung während der Schwangerschaft oder Stillzeit sprechen.

### **Gegenanzeige**

Afinovir<sup>®</sup> Wundschutzgel darf bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile nicht angewendet werden. Bitte wenden Sie das Wundschutzgel nicht gleichzeitig mit anderen Produkten auf der Hautoberfläche an.

### **Wechselwirkungen**

Um Wechselwirkungen mit Arzneimitteln zu vermeiden, sollten Sie Arzneimittel zwei Stunden versetzt auftragen oder Ihren Arzt befragen.

### **Haltbarkeit**

Verwenden Sie Afinovir<sup>®</sup> Wundschutzgel nicht nach Ablauf des Verfallsdatums.

Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen.

## Hinweise

Das Produkt kann Luftbläschen enthalten. Dies ist durch den Herstellungsprozess bedingt und beeinflusst nicht die Qualität.

Aufgrund der Beschaffenheit der Inhaltsstoffe kann nach einiger Zeit eine leichte Dunkelfärbung einsetzen. Diese beeinflusst die Qualität des Produktes nicht.

## Aufbewahrung

Kühl und trocken unter 25 °C sowie über 10 °C aufbewahren.

## Entsorgung

Das Produkt kann mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

## Darreichungsform und Inhalt

Originalverpackung mit 10 ml Gel.

## Meldung von Vorkommnissen

Sollte dieses Produkt in Zusammenhang mit einem schwerwiegenden Vorkommnis stehen (Tod eines Patienten, Anwenders oder einer anderen Person; vorübergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, Anwenders oder anderer Personen; schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Gesundheit), ist dieser Vorfall dem Hersteller und dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zu melden.



## Hersteller

Nutrin GmbH  
Schnaid 36 b  
D-91352 Hallertendorf

## Vertrieb

Phi-Stone AG  
Kaiserstraße 2  
D-24143 Kiel  
info@afinovir.eu

## Bedeutung der Symbole auf der Faltschachtel und dem Etikett



**Verwendbar bis**



**Charge**



**Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden**



**Hersteller**



**Unterer und oberer Temperaturgrenzwert**



**Gebrauchsanweisung beachten**



**Trocken aufbewahren**



**Verwendungsdauer von 3 Monaten nach dem erstmaligen Öffnen**

## Stand der Information

2022-03/Rev02

