

Gebrauchsinformation „NATASCAN® 2% Gel“

NATASCAN® 2% Gel

NATASCAN® 2% Gel wurde speziell zur anti-mikrobiellen Anwendung entwickelt und wird auf der Lidkante aufgetragen.

Anwendung

Vor jedem Gebrauch die Kappe abnehmen. Bitte vor der ersten Anwendung von NATASCAN® 2% Gel die Tube mit der Spitze senkrecht nach unten halten und drücken, bis der erste Geltropfen an der Tubenspitze austritt. Den ersten Tropfen verwerfen. Danach kann das Gel auf der gewünschten Stelle auf der Lidkante appliziert werden.

Die Anwendung von Natascan® 2% Gel erfolgt 2-3x täglich mit der Applikation des Geltropfens auf den Lidrand.

Nach Gebrauch die Tubenspitze sofort sorgfältig mit der Kappe verschließen. Bitte achten Sie darauf, dass die Tubenspitze trocken ist. Vermeiden Sie bei der Anwendung von NATASCAN® 2% Gel jeglichen direkten Kontakt zwischen der Tubenspitze und dem Lidrand.

Wenden Sie sich bitte an den Hersteller, wenn Sie Fragen zur korrekten Anwendung von NATASCAN® 2% Gel haben.

Überempfindlichkeit

Darf nicht verwendet werden bei Überempfindlichkeit gegen das Gel oder gegen einzelne Bestandteile von NATASCAN® 2% Gel.

NATASCAN® 2% Gel wird in einem besonders aufwendigen Verfahren hergestellt, um die hohe Qualität sicherzustellen. Die hochwertigen Inhaltsstoffe von NATASCAN® 2% Gel werden laufend strengsten wissenschaftlichen Kontrollen mit umfassenden Sicherheitsbewertungen unterzogen.

Symbolerklärung



Angabe zur Haltbarkeit nach dem Öffnen – in Monaten (hier 1 Monat).



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.

Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Aufbewahrung

Bei Raumtemperatur bis 25 Grad

Haltbarkeit

Kann bis 4 Wochen nach dem Öffnen verwendet werden.

Wiederverwendung an einzelner Person

Der Inhalt einer Tube sollte immer bei derselben Person angewendet werden.

1 ml NATASCAN® 2% Gel enthält:

2% Full Spectrum Hyaluronat
2% Natamin (Natamycin Suspension)

Zusammensetzung:

Wasser, Pentylen Glycol, Natrium Hyaluronat, Natamin (Natamycin Suspension), Hydrolysiertes Natrium Hyaluronat, Citronensäure

iatroVision GmbH

Feodor-Lynen-Straße 27
Medical Park
30625 Hannover
Tel +49 511 5151 4089
FAX +49 511 8090 4569
E-Mail service@iatroVision.de

Stand der Information: März 2025