

Life is a Picknick!


Kein Stress bei Stichen und Bissen



ASPIVENIN® + SAFECARD™

Zeckenkarte richtig anwenden

1. Bewahren Sie Ruhe! Zeckenentferner mit der geeigneten Gabelung **flach auf der Haut ansetzen**.
2. Schieben Sie den Schlitz der Zeckenkarte unter das Tier.
3. Streifen Sie die Zecke mit einer **ruhigen, gleitenden Bewegung** ab. Vermeiden Sie, dass die Zecke gequetscht wird.
4. Zuletzt Kontrolle und gründliche **Desinfektion** der Wunde!

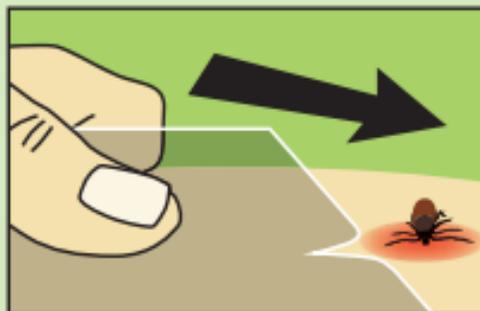

Vermeiden Sie Abbrennen, Einölen oder Ausdrehen, denn dadurch kann sich das Risiko erhöhen, sich mit Krankheitserregern zu infizieren. In Zweifelsfällen, z.B. beim Auftreten von Krankheitssymptomen, oder in FSME-gefährdeten Regionen, empfehlen wir Ihnen, zusätzlich **ärztlichen Rat** hinzuzuziehen.

Auch zum **Entfernen eines Bienenstachels** verwendbar.

themamed

Ihre Gesundheit ist unser Thema

PZN 1033734 • www.themamed.de